

Pflegeempfehlung



Material:

Kunstleder / PVC / Wachstuch / PU-Stoff / Nylonspezialgewebe PU- sowie PUD-Beschichtung/dicht

Die Bezugsmaterialien sind mit Wischdesinfektionsmitteln lt. Desinfektionsmittelliste des VAH zu behandeln. Es darf kein Konzentrat verwendet werden.

Desinfektionsmittel, die zur Reinigung und Flächendesinfektion empfohlen werden:

Hersteller	Mittel
Dr. Schumacher GmbH	Cleanisept / Wipes 5%ig
B. Braun Melsungen AG	Hexaquant lemon fresh 2%ig
Franken Chemie GmbH & Co. KG	Franko-Cid N 0,25%ig
Bode Chemie GmbH	Microbac forte 2,5%ig

Wir empfehlen aldehydfreie Produkte auf Basis oberflächenaktiver Wirkstoffe, zur Schonung der empfindlichen Oberflächen.

Die Desinfektionsmittel sind gemäß dem jeweiligen Gebrauchshinweis zu verwenden.

Für die Anwendung aldehydhaltiger Produkte übernehmen wir keine Gewährleistung der dauerhaften Halbarkeit der Oberflächen.

Material:

Schaumstoff blank

Dampfsterilisation bis 120°C sowie Gassterilisation

Die Angaben basieren auf Praxiserprobungen sowie Erfahrungen unserer Lieferanten.

Ihr Fachhändler:

ppm-marburg

peter pohl medizintechnik

Tel.: 06421 - 931918, Mo.-Fr., 09 - 12 Uhr

Fax: 06421 - 33205

info@ppm-marburg.de

www.ppm-marburg.de

Das Internet-Portal mit zahlreichen Markenfirmen für med. techn. Geräte und Zubehör.

Seit 1997 - Innovative Technik und Dienstleistung, alles aus einer Hand.

Alleinimporteur der Entbindungswannen BENSBERG für Deutschland.